

CONTENU DU KIT


- 20 cassettes test
- 20 écouvillons nasopharyngés stériles
- 20 tubes d'extraction pré-remplis et 20 embouts avec filtre
- 1 porte tubes
- 1 notice d'utilisation

Lire attentivement
la notice d'utilisation



1

PRÉPARATION DU TAMPON D'EXTRACTION

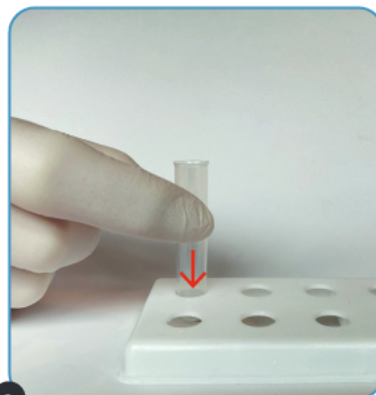


a

Retirer l'opercule et insérer le tube d'extraction pré-rempli au fond du support

2

PRÉLÈVEMENT NASOPHARYNGÉ

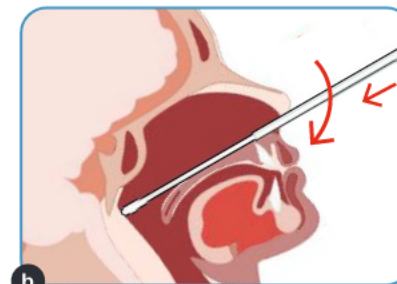


b

Introduire l'écouvillon à l'**horizontal par rapport au visage** et enfoncer jusqu'à sentir une butée
Tourner plusieurs fois l'écouvillon **pendant 5 secondes**


3

PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON

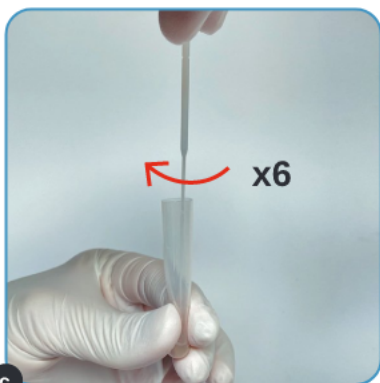


c

Plonger l'écouvillon dans le tube d'extraction pré-rempli et le tourner au moins 6 fois tout en pressant sa tête contre le fond et les côtés du tube d'extraction

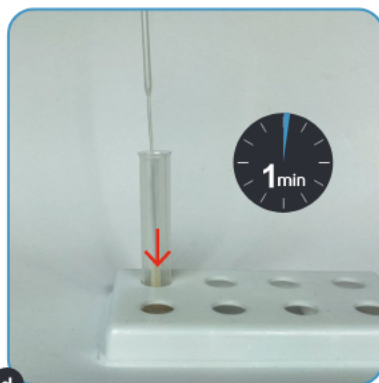


d

Laisser reposer l'écouvillon 1 minute dans le tube d'extraction

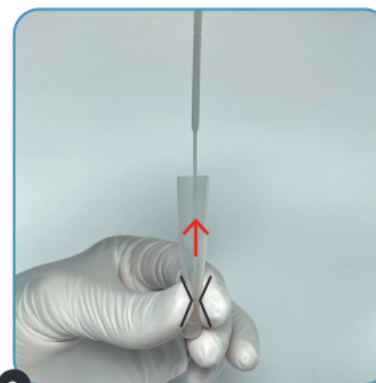

e

Retirer l'écouvillon en le pressant contre les parois du tube d'extraction et le jeter

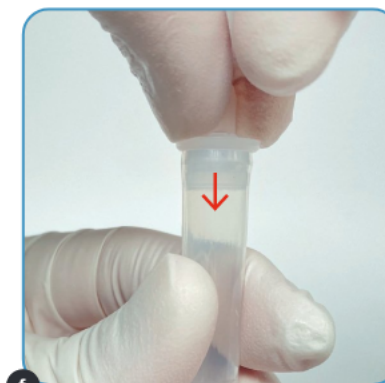

f

Insérer l'embout avec filtre sur le tube d'extraction

L'EMBOU DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT INSÉRÉ DANS LE TUBE

SUITE AU DOS

4 PROCÉDURE

5 LECTURE



**ATTENDRE 15 MINUTES
AVANT DE LIRE LE TEST**

Lire le test à la lumière naturelle ou avec un éclairage suffisant afin de distinguer les bandes de très faible intensité.



g Retirer la cassette du sachet et la poser sur une surface plane



h Déposer 4 gouttes d'échantillon dans le **puits échantillon (S)** de la cassette.

LE FLACON DOIT ÊTRE MAINTENU À LA VERTICALE



NÉGATIF



POSITIFS



L'intensité des bandes rouges peut varier.

AAZ.CV.17-B (20220427)

CONTACT

+33 (0) 1 46 00 40 40
contact@aazlab.fr

AAZ 
Votre santé sous contrôle

43, rue de Bellevue | 92100 Boulogne-Billancourt

**VIDÉO DE DÉMONSTRATION
DISPONIBLE SUR :**
www.covid19aaz.com