



## Test rapide de l'antigène NS1 et de différenciation des anticorps IgM et IgG dirigés contre la Dengue

# MODE OPÉRATOIRE

### CONTENU DU KIT

- 20 cassettes test
- 1 sachet de 20 pipettes de 10 $\mu$ l
- 1 sachet de 20 pipettes de 30 $\mu$ l
- 1 flacon de tampon, 4,0 ml
- 20 lancettes
- 20 tampons d'alcool
- 1 notice d'utilisation



1

Enlever le capuchon en le tournant puis en tirant.



2

Piquer le côté du doigt propre avec la lancette en appuyant fort.



3

Former une grosse goutte de sang suspendue.  
*Le prélèvement est facilité par le bras en position décline (main orientée vers le bas)*

Lire attentivement l'intégralité de la notice avant la 1ère utilisation



Désinfecter le bout du doigt du patient avant la réalisation du test



4

Recueillir le sang avec chaque pipette tenue horizontalement et remplir totalement la pipette.



5

Garder la pipette à la verticale et toucher délicatement le fond du puits pour déposer le sang.  
*Avant la réalisation du test, une bande rouge est présente au niveau de la zone "C" de la bande IgG/IgM.*



6

Ajouter immédiatement deux gouttes de tampon dans les puits S pour IgG/IgM et une goutte dans le puits S pour NS1.


LECTURE, VOIR AU DOS



**ATTENDRE 10 MINUTES  
AVANT DE LIRE LE TEST**


L'intensité des bandes rouges peut varier

**Exemple de cas  
NÉGATIF**

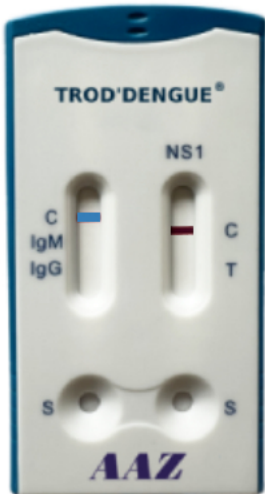

IgM / IgG et NS1 négatifs

**Exemple de cas  
POSITIF**

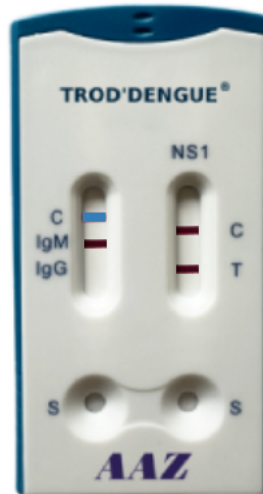

IgM et NS1 positifs

La coloration rouge de ligne contrôle sur la bande IgG/IgM a viré au bleu

Interprétation des résultats : NS1, IgM, IgG			
Antigène NS1	Anticorps IgM	Anticorps IgG	interprétation
+	-	-	infection primaire aiguë probable
+	+	-	infection primaire probable
-	+	-	infection primaire
-	+	+	phase de convalescence
-	-	+	infection ancienne
+	- / +	+	infection secondaire aiguë probable
-	-	-	pas d'infection ou phase d'incubation

## CONTACT

[www.aazlab.fr](http://www.aazlab.fr)  
+33 (0) 1 46 00 40 40  
[contact@aazlab.fr](mailto:contact@aazlab.fr)

**AAZ**

Votre santé sous contrôle

43, rue de Bellevue  
92100 Boulogne-Billancourt