



# Mode opératoire simplifié



**3**  
RÉSULTATS  
EN 1 TEST

BRONCHIOLITE

GRIPPE A/B


COVID



**1**




- Posez le test sur une surface plane
- Enlevez le test de son support en tirant vers le haut

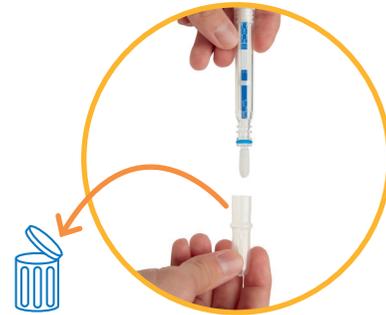


- Retirez le capuchon de protection et jetez-le à la poubelle

**2**

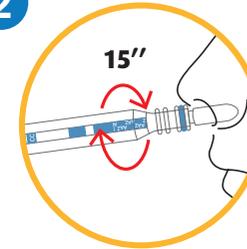

- Insérez l'éponge de prélèvement dans la narine gauche
- Faites plusieurs rotations dans la narine pendant 15 secondes

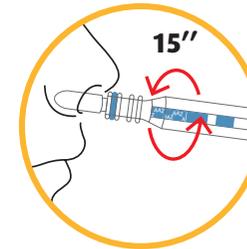

- Répétez la même opération dans la narine droite



**Mouchez le patient avant de réaliser le test**

**3**



- Insérez le test dans le support




**Appuyez fortement pour insérer le test jusqu'au fond du support**



- Attendez 15 minutes avant de lire les résultats

**4**

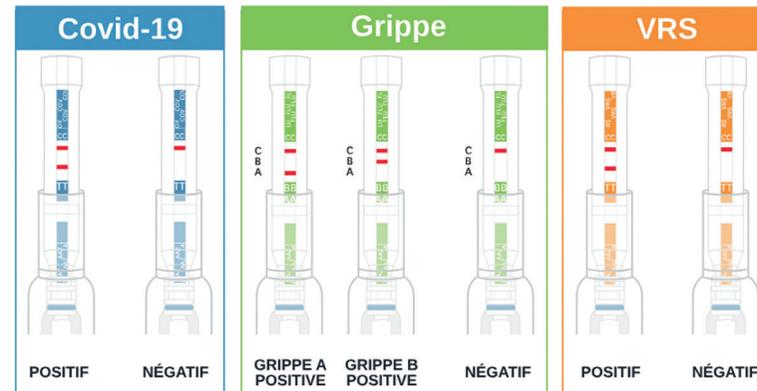

Vidéo de démonstration

