



Test rapide de l'antigène NS1 et de différenciation des anticorps IgM et IgG dirigés contre la Dengue

MODE OPÉRATOIRE

CONTENU DU KIT

- 20 cassettes test
- 1 sachet de 20 pipettes de 10 μ l
- 1 sachet de 20 pipettes de 30 μ l
- 1 flacon de tampon, 4,0 ml
- 20 lancettes
- 20 tampons d'alcool
- 1 notice d'utilisation



1

Enlever le capuchon en le tournant puis en tirant.



2

Piquer le côté du doigt propre avec la lancette en appuyant fort.



3

Former une grosse goutte de sang suspendue.

Le prélèvement est facilité par le bras en position décline (main orientée vers le bas)

Lire attentivement l'intégralité de la notice avant la 1ère utilisation



Désinfecter le bout du doigt du patient avant la réalisation du test



4

Recueillir le sang avec chaque pipette tenue horizontalement et remplir totalement la pipette.



5

Garder la pipette à la verticale et toucher délicatement le fond du puits pour déposer le sang. *Avant la réalisation du test, une bande rouge est présente au niveau de la zone "C" de la bande IgG/IgM.*



6

Ajouter immédiatement deux gouttes de tampon dans les puits S pour IgG/IgM et une goutte dans le puits S pour NS1.


LECTURE, VOIR AU DOS



**ATTENDRE 10 MINUTES
AVANT DE LIRE LE TEST**


L'intensité des bandes rouges peut varier

**Exemple de cas
NÉGATIF**

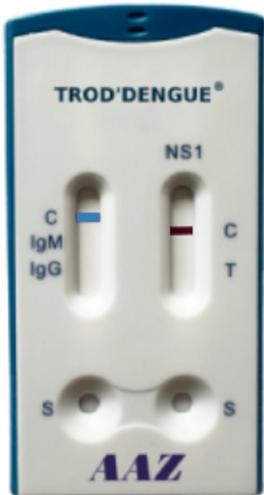

IgM / IgG et NS1 négatifs

**Exemple de cas
POSITIF**

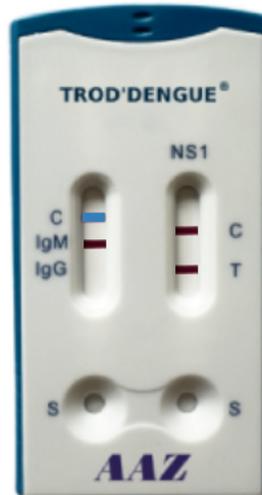

IgM et NS1 positifs

La coloration rouge de ligne contrôle sur la bande IgG/IgM a viré au bleu

Interprétation des résultats : NS1, IgM, IgG			
Antigène NS1	Anticorps IgM	Anticorps IgG	interprétation
+	-	-	infection primaire aiguë probable
+	+	-	infection primaire probable
-	+	-	infection primaire
-	+	+	phase de convalescence
-	-	+	infection ancienne
+	- / +	+	infection secondaire aiguë probable
-	-	-	pas d'infection ou phase d'incubation

CONTACT

www.aazlab.fr
+33 (0) 1 46 00 40 40
contact@aazlab.fr

AAZ

Votre santé sous contrôle

43, rue de Bellevue
92100 Boulogne-Billancourt