




# KIT HYGIÉNIQUE DE DÉPISTAGE DE LA CYSTITE

## ETAPE 1 Prélèvement de l'échantillon




Ouvrir le flacon

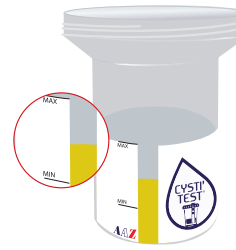

Recueillir l'échantillon, le volume doit être compris entre les traits de jauge **MIN** et **MAX**


Enlever l'excédent d'urine si le niveau de remplissage dépasse le trait **MAX**

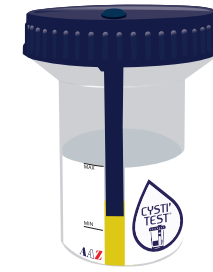

Fermer le flacon

Placer le flacon dans le sachet plastique


## ETAPE 2 Réalisation du test

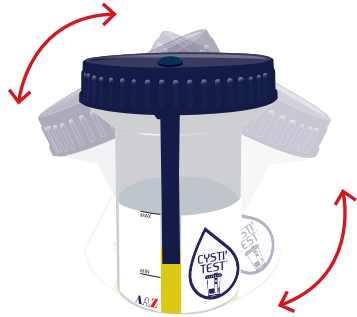

Homogénéiser l'échantillon




Enlever le bouchon situé sur le couvercle

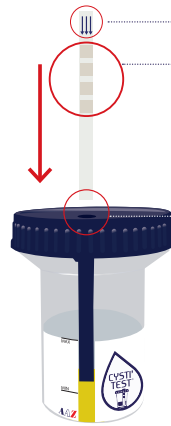

Flèches orientées vers le bas  
Patches visibles de l'extérieur

Insérer la bandelette dans l'orifice

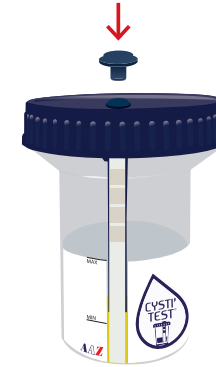


Remettre le bouchon situé sur le couvercle

Incliner le flacon pendant **1 seconde** afin que la bandelette soit complètement imbibée




## ETAPE 3 Lecture et interprétation des résultats

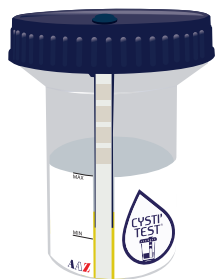

Lire les résultats à **2 minutes**

Utiliser le nuancier pour rendre le diagnostic

Leucocytes  
Nitrites  
Sang  
Protéines

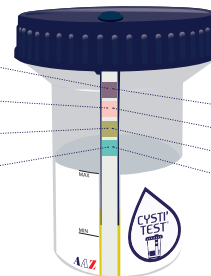

Lire les résultats à 2 minutes

Leucocytes	Neg.	Traces ±	Positif
Nitrites	Neg.	Traces ±	Positif
Sang	Neg.	Traces ±	Positif
Protéines	Neg.	Traces ±	Positif

Tout degré de couleur rose uniforme