



## KIT HYGIÉNIQUE DE DÉPISTAGE DE LA CYSTITE

## **ETAPE 1** Prélèvement de l'échantillon





Recueillir l'échantillon, le volume doit être compris entre les traits de jauge MIN et MAX

Enlever l'excédent d'urine si le niveau de remplissage dépasse le trait MAX



Fermer le flacon

Placer le flacon dans le sachet plastique

## **ETAPE 2** Réalisation du test









Incliner le flacon pendant

1 seconde afin que la bandelette
soit complètement imbibée



**ETAPE 3** Lecture et interprétation des résultats





