


### CONTENU DU KIT

- 20 cassettes test
- 20 écouvillons nasopharyngés stériles
- 20 tubes d'extraction pré-remplis et 20 embouts avec filtre
- 1 porte tubes
- 1 notice d'utilisation

Lire attentivement  
la notice d'utilisation




### 1 PRÉPARATION DU TAMPON D'EXTRACTION

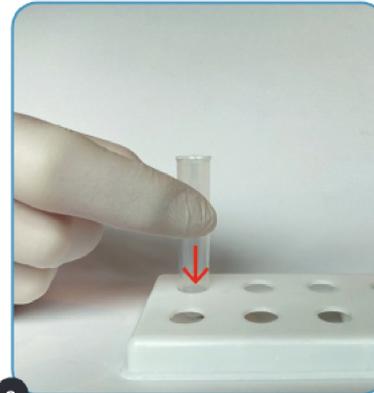


**a** Retirer l'opercule et insérer le tube d'extraction pré-rempli au fond du support

### 2 PRÉLÈVEMENT NASOPHARYNGÉ

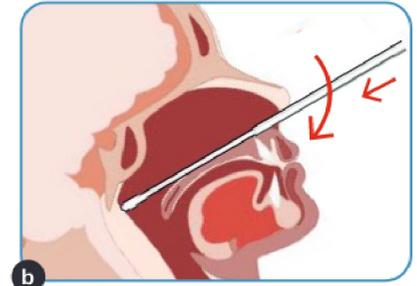


**b** Introduire l'écouvillon à l'**horizontal par rapport au visage** et enfoncer jusqu'à sentir une butée  
Tourner plusieurs fois l'écouvillon **pendant 5 secondes**


### 3 PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON

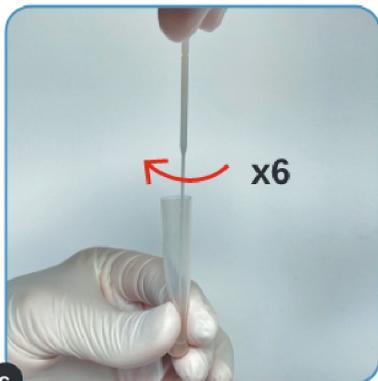

**c** Plonger l'écouvillon dans le tube d'extraction pré-rempli et le tourner au moins 6 fois tout en pressant sa tête contre le fond et les côtés du tube d'extraction

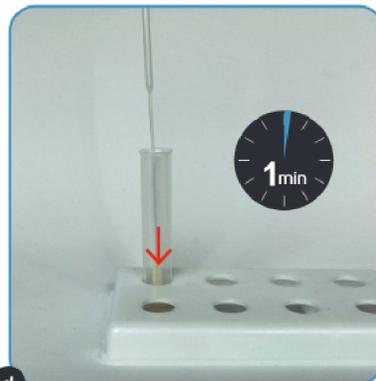

**d** Laisser reposer l'écouvillon 1 minute dans le tube d'extraction

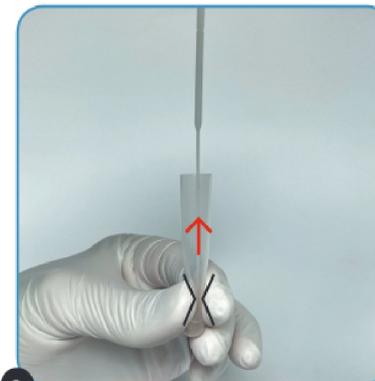

**e** Retirer l'écouvillon en le pressant contre les parois du tube d'extraction et le jeter



**f** Insérer l'embout avec filtre sur le tube d'extraction

**L'EMBOU DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT INSÉRÉ DANS LE TUBE**

SUITE AU DOS

### 4 PROCÉDURE

### 5 LECTURE



**ATTENDRE 15 MINUTES  
AVANT DE LIRE LE TEST**

Lire le test à la lumière naturelle ou avec un éclairage suffisant afin de distinguer les bandes de très faible intensité.



**g** Retirer la cassette du sachet et la poser sur une surface plane



**h** Déposer 4 gouttes d'échantillon dans le **puits échantillon (S)** de la cassette.

**LE FLACON DOIT ÊTRE MAINTENU À LA VERTICALE**



**NÉGATIF**



**POSITIFS**



L'intensité des bandes rouges peut varier.

AAZ.CV.17-B (20220427)

### CONTACT

+33 (0) 1 46 00 40 40  
[contact@azlab.fr](mailto:contact@azlab.fr)

**AAZ**   
Votre santé sous contrôle

43, rue de Bellevue | 92100 Boulogne-Billancourt

**VIDÉO DE DÉMONSTRATION  
DISPONIBLE SUR :  
[azlab.fr](http://azlab.fr)**