

Bras tendu le long du corps (position déclive), main au niveau de la taille

## Conseils pour le prélèvement de sang total au bout du doigt

Prélèvement facilité par le lavage des mains à l'eau chaude



- 1 Identifier le test INSTI<sup>TM</sup>**  
Piquer le doigt propre du patient et former une grosse goutte de sang suspendue.



- 2** Recueillir la première goutte de sang avec la pipette **horizontale** sans presser la poire de la pipette.
- Former une **nouvelle goutte de sang** suspendue et la recueillir en approchant la pipette **horizontalement** de la goutte.
- Répéter l'opération jusqu'à ce que le sang ait atteint le **trait noir** de la pipette.






- 3** Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le **flacon 1**.
- Refermer le flacon et l'homogénéiser par 2 inversions.





- 4** Vider le contenu du **flacon 1** dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane.
- Homogénéiser par inversion le **flacon 2** puis vider son contenu dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane.
- Répéter l'opération précédente pour le **flacon 3** et lire le résultat du test **immédiatement**.

## Lecture/Interprétation

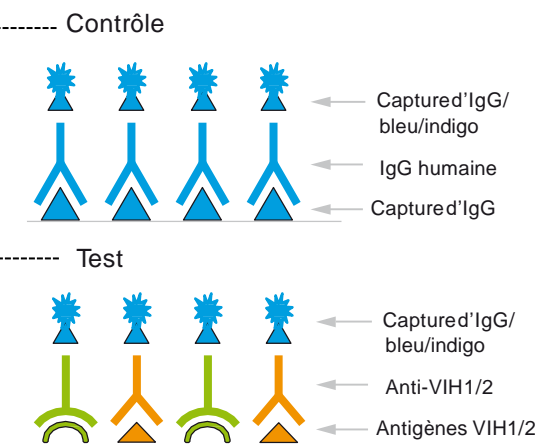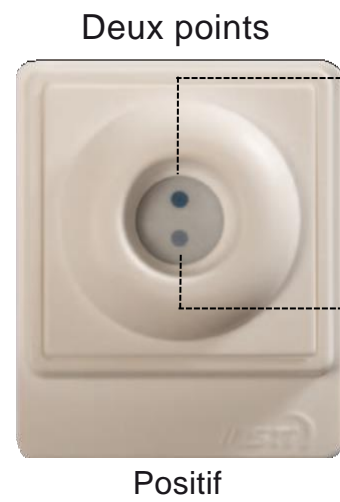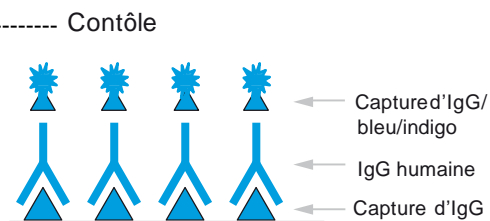

## Résultats ininterprétables

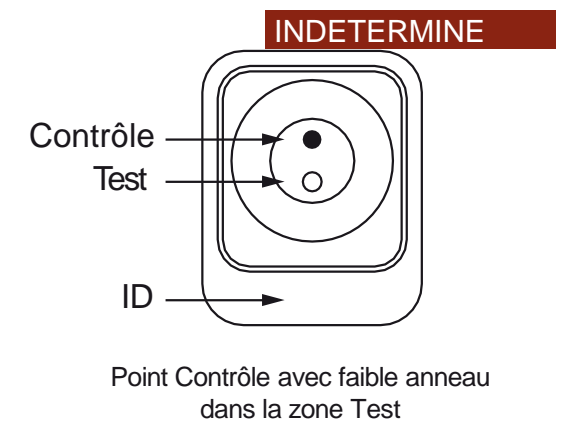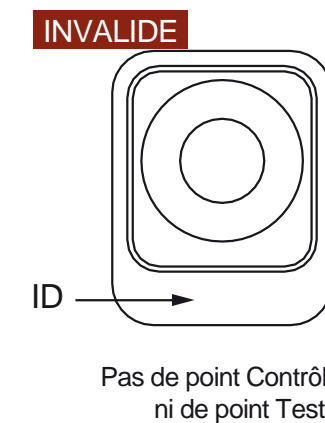

**Recommandation :** tout test ininterprétable doit être répété avec un nouvel échantillon sanguin en utilisant un nouveau test INSTI et de nouveaux accessoires.