

Brastendu le long du corps (position déclive), main au niveau de la taille

Rapidité d'utilisation Simplicité d'interprétation

Conseils pour le prélèvement de sang total au bout du doigt

1) PRÉLÈVEMENT



■Identifier le test INSTI™ multiplex
■ Piquer le doigt propre du patient Désinfecter le doigt (en évitant la pince)





Former une grosse goutte de sang suspendue



 Recueillir la goutte de sang suspendue en approchant la pipette horizontalement de la goutte



 Former une nouvelle goutte de sang suspendue et la recueillir de la même façon en gardant la pipette à l'horizontale



Prélèvement facilité par le lavage préalable des mains à l'eau chaude

Répéter l'opération jusqu'à ce que le sang ait atteint le trait noir de la pipette

RÉALISATION DU TEST



Introduire la pipette au fond du flacon 1



Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le flacon 1



Refermerle flacon et l'homogénéiser par 2 inversions



Vider le contenu du flacon 1 dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane



Homogénéiser par inversion le flacon 2 jusqu'à remettre la solution en suspension puis vider son contenu dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé



 Répéter l'opération précédente pour le flacon 3 et lire le résultat du test immédiatement


Lecture / Interprétation des résultats 4 possibilités



Deux points



Deux points

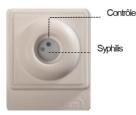



Trois points



VIH	Syphilis
+	+





Point Syphilis



bleu indigo

Captured'IgG/

Captured'lgG/lgM

Anti-VIH 1/2

Captured'lgG/

Antigènes Syphilis

Résultats ininterprétables

INVALIDE




Pas de point Contrôle ni de points Test

INDÉTERMINÉS





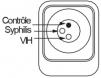

Point Contrôle avec faibles anneaux dans les zones

Recommandation: tout test ininterprétable doit être répété avecun nouvel échantillon sanguin en utilisant un nouveau test INSTI™/ INSTI™Multiplex et de nouveaux accessoires

Tout test positif doit être confirmé en laboratoire ou en CeGIDD