




KIT HYGIÉNIQUE DE DÉPISTAGE DE LA CYSTITE

ETAPE 1 Prélèvement de l'échantillon



Placer le flacon dans le sachet plastique


ETAPE 2 Réalisation du test

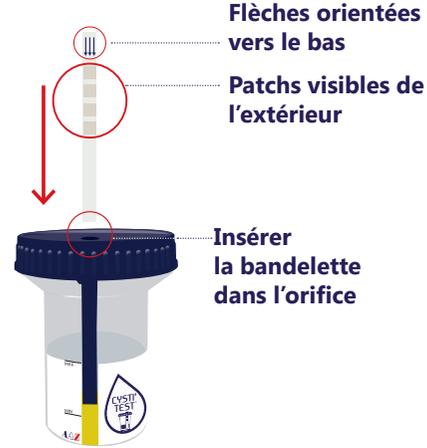

ETAPE 3 Lecture et interprétation des résultats



Utiliser le nuancier pour rendre le diagnostic

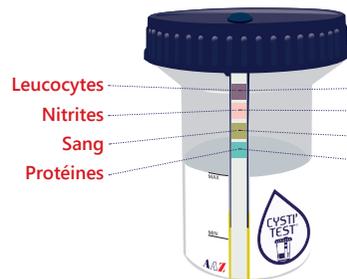

Lire les résultats à 2 minutes

Paramètre	Négatif	Traces ±	Positif
Leucocytes	Neg.	Traces ±	Positif
Nitrites	Neg.	Tout degré de couleur rose uniforme	Positif
Sang	Neg.	Traces ±	Positif
Protéines	Neg.	Traces ±	Positif