



Mode opératoire simplifié



TEST RAPIDE DE DÉTERMINATION
DU STATUT IMMUNITAIRE VIS-À-VIS DU TÉTANOS

DISPONIBLE VIA

resah



aazlab.fr



TEST RAPIDE DE DÉTERMINATION
DU STATUT IMMUNITAIRE
VIS-À-VIS DU TÉTANOS

Mode opératoire simplifié



1




➔ Piquer le doigt du patient.




➔ Former une grosse goutte de sang suspendue.

2

⚠ Ne pas presser la poire de la pipette

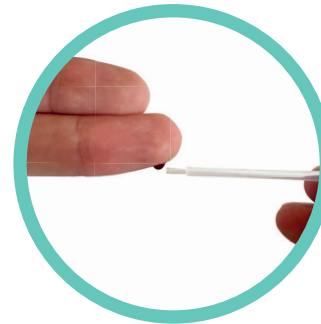


➔ Recueillir la première goutte de sang avec la pipette horizontale. Le sang est aspiré automatiquement par capillarité.

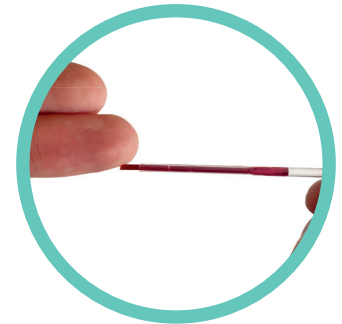


➔ Former une nouvelle goutte de sang. Répéter l'opération jusqu'à ce que le sang atteigne le trait noir.

3

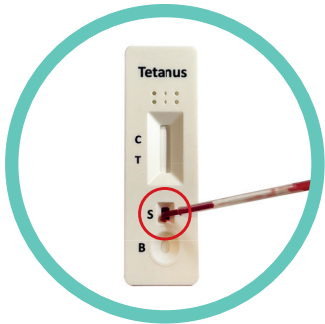

➔ Presser la poire pour déposer l'échantillon dans le puits S au milieu de la cassette.

4

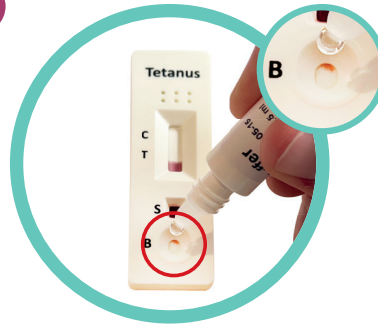


➔ Ajouter 2 gouttes de tampon dans le puits B en bas de la cassette.

5




Positif

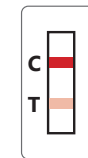

Négatif



Invalide

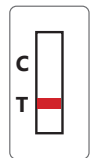

➔ Attendre 15 minutes avant de lire les résultats.